


Instrukcja wykonania pomiaru systemem PregnaLife24 Smart Monitoring

1. Sprawdź czy posiadasz wszystkie potrzebne elementy do wykonania badania (powinny znajdować się w pudełku na urządzenie):
 - a. Urządzenie ZuzaMED,
 - b. elektrody,
 - c. kable do podłączenia urządzenia.
2. Naładuj urządzenie ZuzaMED ładowarką z otrzymanego zestawu (czas ładowania min. 3-5 godz.)
3. Oczyszczaj brzuch stosując środki higieniczne a następnie wytrzyj do sucha.
4. Naklej elektrody na brzuch wg poniższego schematu (na elektrodach nie ma kolorów, znajdują się one na kablach połączeniowych)

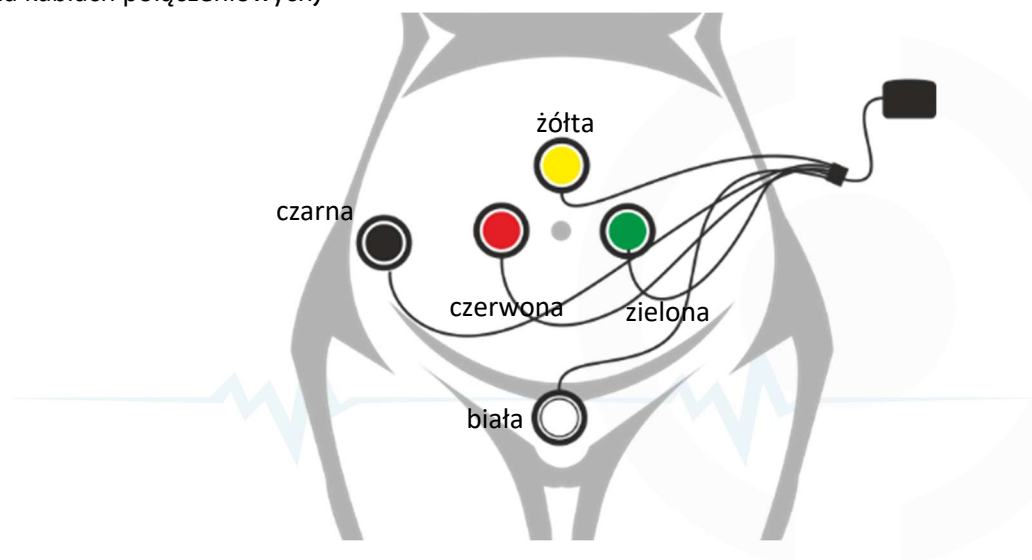

5. Podepnij kable do elektrod uwzględniając ułożenie kolorów z powyższego rysunku.
6. Podłącz kable (niebieska wtyczka) do urządzenia ZuzaMED.
7. Uruchom urządzenie niebieskim przyciskiem na środku obudowy w celu rozpoczęcia pomiaru.
8. Przyjmij wygodną pozycję, udaj się na spoczynek.
9. Prowadź rejestrację danych przez co najmniej 2 godziny. Możesz swobodnie wykonywać ruchy w stanie spoczynku, przekręcać się na boki, siadać. Unikaj jednak nadmiernej aktywności fizycznej.
10. Po upływie min. 2 godzin odłącz urządzenie od kabli.
11. Odłącz kable od elektrod.
12. Odklej elektrody (elektrody są jednorazowego użytku) i zutylizuj je.

13. Uruchom aplikację PregnaLIFE24 na smartfonie.
14. Jeśli jest to pierwsze uruchomienie należy zaakceptować regulamin i skonfigurować Aplikację. Instrukcja konfiguracji znajduje się poniżej.
15. Upewnij się że znajdujesz się na ekranie startowym aplikacji (na ekranie tym znajduje się napis: Podłącz urządzenie Zuzamed”).
16. Podłącz urządzenie do smartfona przy użyciu kabla USB oraz przejściówki (OTG) właściwej dla twojego złącza w telefonie (nie znajduje się w zestawie) z zainstalowaną aplikacją PregnaLife24
17. Zaakceptuj podłączenie urządzenia (komunikat pojawi się na telefonach z systemem ANDROID po podłączeniu urządzenia Zuzamed)
18. Dokonaj płatności mobilnej za wykonanie analizy. Płatności
19. System automatycznie prześle dane do analizy. Zostaniesz powiadomiona o zakończeniu transmisji komunikatem.
20. Potwierdź przyciskiem OK koniec wysyłania.
21. Poczekaj na wyniki analizy zgromadzonych danych – okres analizy zależy od tego jak długo urządzenie zapisywało dane dziecka na brzuchu mamy. Przeanalizowane pomiary znajdują się w zakładce LISTA POMIARÓW
22. System powiadomi Cię o otrzymaniu wyniku analizy
23. Sprawdź wynik monitoringu i prześlij je do swojego lekarza poprzez SMS lub mail używając odpowiedniej ikonki na liście pomiarów.

UWAGA: Aplikację PregnaLIFE24 należy pobrać ze sklepu Google PLAY. W polu wyszukiwania wpisz PregnaLIFE24.

Informacje dodatkowe.



5. Elektroda naklejana na brzuch



3. Kolektor danych Zuzamed



1. Kable pacjenta z wtyczką do kolektora



2. Kabel przyłączeniowy do ładowarki oraz do połączenia z telefonem



4. Przejściówka pomiędzy kablem przyłączeniowym a telefonem

Created by MoFeMa S.A.

Al. Zygmunta Krasińskiego 1/Lok610; 31-111 Kraków ; Polska
NIP: 6772376984 ; REGON:122939783 ; KRS:0000962104